



# IBM iConnect<sup>®</sup> Enterprise Archive 13.1

**DÉCLARATION D'INTÉGRATION IHE**

Matériel sous licence - Propriété d'IBM

© Copyright IBM Corporation, 2020.

IBM, le logo IBM, IBM Watson et Watson Health sont des marques déposées d'IBM Corporation aux États-Unis, dans d'autres pays ou les deux. L'utilisation des marques déposées d'IBM citées dans le présent document se fait par autorisation et sous licence de l'entreprise IBM.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis, dans d'autres pays ou les deux.

Tous les autres noms d'entreprises ou de produits sont des marques déposées de leurs entreprises respectives.

Les titulaires de ce programme qui souhaitent obtenir des renseignements à ce sujet dans le but de permettre : (i) l'échange d'informations entre des programmes créés de manière indépendante et d'autres programmes (y compris celui-ci) et (ii) l'utilisation mutuelle des informations échangées, doivent contacter le directeur des licences IBM. Ces informations peuvent être disponibles, sous réserve des conditions appropriées, y compris dans certains cas, avec un paiement de frais.

Directeur des licences IBM  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785

IBM accorde aux détenteurs de licence une autorisation limitée pour effectuer des copies papier ou autres reproductions de toute documentation lisible par machine, sous réserve que chaque reproduction porte les avis de copyright IBM et que son utilisation soit régie par les conditions générales spécifiées par IBM dans les Spécifications du programme sous licence. Toute reproduction ou utilisation au-delà de la permission limitée accordée par la présente constituerait une violation du contrat de licence et une violation des droits d'auteur applicables.

Les documents affichés ou reproduits par ce programme peuvent être protégés par des droits d'auteurs ou des restrictions contractuelles d'IBM et/ou d'autres entités. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de disposer de la permission d'afficher et de reproduire de tels documents et d'inclure les avis de droits d'auteur et légendes applicables.

#### **DROITS DE RESTRICTIONS DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN:**

Utilisation, duplication ou divulgation limitée par le contrat d'agenda GSA ADP avec IBM Corporation.

#### **INSTRUCTIONS D'UTILISATION:**


Les instructions d'utilisation sont disponibles sous forme électronique au format PDF. Le format papier peut être demandé pour les langues prises en charge en contactant le Support client et sera fourni sans frais dans les sept jours civils suivant la réception de la demande. Le format papier peut également être fourni au moment de la livraison s'il est demandé lors de la commande.

#### **UTILISATION PRÉVUE:**

IBM iConnect Enterprise Archive est un système logiciel qui prend en charge le stockage et communication d'images et de données médicales. Les administrateurs système qualifiés surveillent et prennent en charge la maintenance du logiciel dans l'environnement de leurs entreprises de santé.

**MISE EN GARDE:** La législation fédérale américaine restreint ce dispositif à la vente par un médecin ou sur l'ordre d'un médecin.

**IDENTIFIANT DU DISPOSITIF AU CANADA:** 100-00002-00

 Merge Healthcare Incorporated  
900 Walnut Ridge Drive  
Hartland, WI 53029

Le glossaire des symboles est fourni par voie électronique à l'adresse suivante <https://developer.ibm.com/watsonhealth/ibm-merge-statements-and-patches/>.

Pour obtenir de l'assistance ou pour signaler des problèmes liés à la documentation utilisateur, contactez l'assistance à la clientèle :

- En Amérique du Nord : composez sans frais le 1-877-741-5369
- En dehors de l'Amérique du Nord :  
E/MO/A : +31 20514 5073  
En Australie : 1 800 316 746
- Courrier électronique : [WHISupport@us.ibm.com](mailto:WHISupport@us.ibm.com)

Partie	Date	Version	Description
ECM-23015	Juillet 2020	1.0	Version initiale pour 13.1

La dernière révision de ce document est disponible dans [IBM Watson Health Community \(https://mergcustomer.force.com/mergeusercommunity/login\)](https://mergcustomer.force.com/mergeusercommunity/login).



# Déclaration d'intégration IHE

Le tableau suivant présente la déclaration d'intégration IHE.

Déclaration d'intégration IHE		Date
		2020
Fournisseur	Nom du produit	Version
Merge Healthcare Incorporated	IBM iConnect® Enterprise Archive	13.1
Ce produit est destiné à mettre en œuvre toutes les transactions requises dans le cadre technique IHE pour prendre en charge les profils, les acteurs et les options d'intégration IHE répertoriées ci-dessous :		
Profils d'intégration implémentés	Acteurs implémentés	Options implémentées
Flux de travail planifié	Gestionnaire d'images/archives d'images	Aucun
	Gestionnaire des étapes de procédure réalisée	Aucun
Rapprochement des renseignements sur le patient	Gestionnaire d'images/archives d'images	Aucun
	Gestionnaire des étapes de procédure réalisée	Aucun
Présentation cohérente des images	Gestionnaire d'images/archives d'images	Aucun
Présentation de procédures groupées	Gestionnaire d'images/archives d'images	Aucun
	Gestionnaire des étapes de procédure réalisée	Aucun
Documents de preuve	Gestionnaire d'images/archives d'images	Aucun
Note d'image principale	Gestionnaire d'images/archives d'images	Aucun
Rapport simple image et numérique	Référentiel de rapports	Aucun
	Référentiel de rapports d'entreprise	Aucun
	Accès au référentiel de rapports externe	Aucun

<b>Accès aux informations de radiologie</b>	Gestionnaire d'images/archives d'images	Aucun
	Référentiel de rapports	Aucun
	Accès au référentiel de rapports externe	Aucun
<b>Médecine nucléaire</b>	Gestionnaire d'images/archives d'images	Aucun
<b>Flux de travail de cathétérisme cardiaque</b>	Gestionnaire d'images/archives d'images	Modalité connectée par intermittence, cathétérisme cardiaque
	Gestionnaire des étapes de procédure réalisée	Aucun
<b>Flux de travail d'échocardiographie</b>	Gestionnaire d'images/archives d'images	Échocardiographie, modalité connectée par intermittence
	Gestionnaire des étapes de procédure réalisée	Aucun
<b>Documents de preuve - cardiologie</b>	Gestionnaire d'images/archives d'images	Aucun
<b>Temps cohérent (CT)</b>	Temps client	Aucun
<b>Mammographie</b>	Gestionnaire d'images/archives d'images	Aucun
<b>Flux de travail des tests de stress</b>	Gestionnaire d'images/archives d'images	Aucun
	Gestionnaire des étapes de procédure réalisée	Aucun
<b>Partage de documents entre les entreprises pour l'imagerie (XDS-I.b)</b>	Source de document d'image	Ensemble d'instances DICOM
	Dépôt de documents	Aucun
<b>Partage de documents entre entreprises (XDS.b)</b>	Archives de documents	Flux d'identité des patients (HL7 V2), Flux d'identité des patients (HL7 V3), Documents à la demande, Identifiant de référence, Mise à jour des méta-données des documents
	Dépôt de documents	Aucun
	Source/dépôt des documents intégrés	Remplacement de document
<b>Piste d'audit et Authentification de nœud (ATNA)</b>	Application sécurisée	Aucun
<b>Références croisées des identifiants des patients (PIX)</b>	Gestionnaire de références croisées des identifiants des patients	Aucun
	Consommateur de références croisées des identifiants des patients	Notification de mise à jour PIX

<b>Requête de données démographiques des patients (PDQ)</b>	Fournisseur de données démographiques des patients	Aucun
	Consommateur des données démographiques des patients	Aucun
<b>Gestion des modifications d'objets d'imagerie (IOCM)</b>	Gestionnaire d'images/archives	Aucun
	Demandeur de changement	Aucun
<b>Abonnement aux métadonnées de document (DSUB)</b>	Intermédiaire de notification de métadonnées de document	Abonnement indépendant du patient, abonnement au dossier
	Éditeur de métadonnées de document	Aucun
<b>Requêtes multi-patients (MPQ)</b>	Archives de documents	Aucun
<b>Capture d'image Web (WIC)</b>	Gestionnaire d'images	Aucun
<b>Adresse internet pour les informations IHE du fournisseur :</b>	<a href="http://www.merge.com/Support/Resources/IHE-Statements.aspx">www.merge.com/Support/Resources/IHE-Statements.aspx</a>	
<b>Liens vers les déclarations de conformité aux normes pour implémentation</b>		
<b>HL7</b>	Se reporter à Merge Communities -- <a href="http://www.merge.com/Support/Support-Portal.aspx">http://www.merge.com/Support/Support-Portal.aspx</a>	
<b>DICOM</b>	<a href="http://www.merge.com/Support/Resources/DICOM-Conformance-Statements.aspx">www.merge.com/Support/Resources/DICOM-Conformance-Statements.aspx</a>	
<b>Liens vers des informations générales sur IHE</b>		
En Amérique du Nord : <a href="http://www.ihe.net">http://www.ihe.net</a>	En Europe : <a href="http://www.ihe-europe.net">http://www.ihe-europe.net</a>	Au Japon : <a href="http://www.ihe-j.org">http://www.ihe-j.org</a>